

Rešavanje problema

Simptom	Kontrolna tačka	Ispравка
SpO2 ili puls se ne prikazuju	Prst pogrešno postavljen SpO2 je prenizak za detektovanje	Postavite pravilno prst i pokušajte ponovo. Pokušajte ponovo; konsultujte se sa lekarom ako ste sigurni da uređaj radi ispravno.
SpO2 ili puls se ne prikazuju stabilno	Prst pogrešno postavljen Prst se trese ili se telo pomera	Postavite pravilno prst i pokušajte ponovo. Držite telo mirno.
Nema prikaza kada se dugme pritisne	Oslabljene baterije Baterija netačno postavljena	Zamenite novom baterijom. Ponovo postavite bateriju.
Prikaz iznenada nestaje	Uređaj se sam gasi kada nema signala Slaba baterija	Normalno. Zamenite novom baterijom.

⚠️ Napomena: Ako jedinica ne radi vratiće je prodavcu. Ni u kom slučaju ne smete rastavljati i popravljati jedinicu sami.

 Napomena: Ako jedinica ne radi vratite je prodavcu. Ni u kom slučaju ne smete rastavljati i popravljati jedinicu sami.

Specifikacija

SpO2	
Opseg merenja	35 % ~ 99 %, (rezolucija 1%).
Preciznost	70%~99% ±2%, ispod 35~69%: neodređeno.
Optički senzor	Talasna dužina LED crvenog svetla je 660 nm, a infracrvenog LED svetla 905/880 nm sa maksimalnim optičkim izlazom energije od 4 mW/Sr.
Puls	
Opseg merenja	30 bpm~250 bpm (rezolucija 1 bpm)
Preciznost	±3 bpm
Izvor energije	AAA x2 (Alkalne)
Životni vek baterije	16 sati u kontinuitetu sa dve alkalne baterije
Uslovi rada	Temperatura: 5°C ~40°C (41°F ~104°F), relativna vlažnost: 15-95% (nekondenzirajuća), atmosferski pritisak: 700hPa~1060hPa, visina: -1280 do 12000 stopa (-390m do 3658 m)
Uslovi skladištenja/ transporta	Temperatura: -25°C ~70°C (-13°F ~158°F), relativna vlažnost: 15-95% (nekondenzirajuća), atmosferski pritisak: 700hPa~1060hPa, visina: -1280 do 12000 stopa (-390m do 3658 m), vreme od 70°C ili -25°C do ponovne upotrebe: 3 sata
Dimenzije	63,5 (D) x 34 (Š) x 35 (V) mm
Težina	Oko 37g (bez baterija)
Standardi	IEC60601-1-2, Klasa B, IEC 60601-1-1, Tip BF, ISO80601-1-2-61, IEC/EN60601-1-11
	Primenjeni delovi / tip BF
JP klasifikacija	JP22: Zaštita od štetnog ulaska vode i čestica

Nanomena

- Opis efekata na prikazani i trasmitovani SpO₂ i puls su:
 - Prosečan podatak: 4 sekunde za SpO₂; 8 sekundi za puls.
 - Kašnjenje pri ažuriranju podataka: Manje od 2 sekunde.

EMC smernica i izjava proizvođača

Preporučena distanca između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme i ME opreme			
Ocjena maksimalne izlazna snaga transmmitera/W	Distanca prema frekvencijama transmmitera/m		
od 150 kHz do 80 MHz, d=[3,5/V1] \sqrt{P}	80 MHz do 800 MHz, d=[3,5/E1] \sqrt{P}	800 MHz do 2,5 GHz, d=[7/E1] \sqrt{P}	
0,01	0,1	0,1	0,2
0,1	0,4	0,4	0,7
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	11,7	11,7	23,3

Izjava – elektromagnetska emisija		
Pulnski oksimetar za prst je namjenjen elektromagnetskom okruženju u kojem je pogodan RF ometanje kontrolisano. Klijent ili korisnik pušnog oksimetara za prst može pomoći u savremenu elektromagnetskoj mreži odjavljivanjem minimalne distane između prenosive i mobilne RF opreme (transmmiter) i pušnog oksimetra za prst kako je dole preporučeno, prema maksimalnoj (članjanoj) energiji komunikacijske opreme.		
Test emisije	Usaglašenošć	Elektromagnetsko okruženje – smemica
RF emisija CISR 11	Grupa 1	Prenosivu ili mobilnu RF komunikacijsku opremu se ne bi trebala koristiti blizu kog delu OPREME ili SISTEMA uključujući kable, osim na preporučenoj distanci izračunatoj jedinicom prema vrijednosti na frekvencije transmmitera. U blizini opreme označene sledećim simbolom može doći do ometanja.
RF emisija CISR 11	Klasa B	Pulnski oksimetar za prst je pogodan za korišćenje u svim ustanovama uključujući stambene kao i one u direktnom kontaktu sa javnim mrežama za snabdevanje miskonapornom energijom koje snabdevaju zgrade za knutje potrebe.
Harmonična emisija IEC61000-3-2	NP	
Fluktuacija napona/Emisija strujućih struja JES1000-1-3	NP	

Deklaracija – elektromagnetska emisija

Test imuniteta	IEC60601 nivo testa	Nivo usaglašenosti	Elektromagnetsko okruženje – smernica
Elektrostatično otprijetanje (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, +4 kV, +8 kV, KV, ±15 kV vazduh	±8 kV kontakt +2 kV, +4 kV, +8 kV, ±15 kV vazduh	Podvod bi trebalo da budu od drvene čelimira ili keramičkih pločica. Ako su podovi prekriveni sintetičkim materijalom relativna vlažnost treba da bude 30 %.
Brazi električni tranzit/ prasak IEC 61000-4-4	±2 KV za strujne vodove ±1 KV za ulazne/izlazne vodove	NP	Kvalitetne struje meze bi trebalo biti kao za tipično komercijalni ili bolničko okruženje.
Nagli talas IEC 61000-4-5	±0,5 KV ±1 KV difer. modul ±2 KV stand. modul	NP	Kvalitetne struje meze bi trebalo biti kao za tipično komercijalni ili bolničko okruženje.
Padovi napona, kratki prekidi i varijacije u naponu ulaza voda za snabdevanje energije IEC 61000-4-11	0% U; 0,5 ciklus na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 360° 0% U; 1 ciklus i 10% U, 25/30 ciklusa, jedna faza na 0°	NP	Kvalitetne struje meze bi trebalo biti kao za tipično komercijalni ili bolničko okruženje. Ako je korisnik OPREME ili SISTEMA potreban pad u rasponu rad tokom prekida strujne mreže, preveravaj se da li OPREMA ili SISTEM napaja pomoćno neprekidnog napajanja ili baterije.
Magnetno polje frekvencije energije (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetno polje frekvencije energije treba da bude na nivou karakterističnom za tipičnu lokaciju ili tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju.

Nanomena

1. Proizvod ima vek upotrebe od 5 godina za standardnu upotrebu.
 2. Ako se dogodi bilo kakav ozbiljan incident (npr. smrt), a u vezi sa uređajem, potrebno ga je prijaviti proizvođaču i nadležnom organu zemlje u kojoj je korisnik/pacijent rezident.
 3. Tekst se može izmeniti bez prethodnog obaveštenja.



RS Puljni oksimetar za prst

www.rossmax.com

Garantni list

Ovaj instrument pokriva garanciju od 2 godine od datuma kupovine, baterije i dodaci nisu uključeni. Garancija je validna samo uz prikaz garantnog lista koji je popunio prodavac, a koji potvrđuje datum kupovine ili račun. Otvarami i menjanje instrumenta čini garanciju nevažećom. Garancija ne pokriva oštećenja, nezgode ni neusaglašenost sa uputstvom za upotrebu. Kontaktirajte lokalnog prodavca i/ili reprezentanta na www.rossmax.com

Ime kupca:

Adresa: _____

Telefon: _____

Imejl adresa: _____

Informacije o proizvodu: _____

Datum kupovine: _____

Kupljeno u radnji:



 **UPOZORENJE:** Oznaka na proizvodu znači da je ovo električni proizvod i shodno Evropskoj direktivi 2012/19/EU električni proizvodi moraju biti odloženi u Vašem lokalnom centru za recikliranje radi bezbednog čuvanja.

 Rossmax InnoTek Corp.
12F, No. 189, Kang Chien Rd., Taipei
114, Taiwan

EC REP CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo Nº 18, CP 29006,
Málaga, España



Uvod

Rosmax puljni oksimetar za prst SB100 se koristi za merenje zasićenja arterijskog kiseonika (%SpO₂) u hemoglobinu, kao i pulsa, važnog indikatora respiratornih funkcija. To je neinvazivni uređaj dizajniran za trenutnu proveru kod odraslih i dece iznad 3 godine, kod kuće ili u bolnicama.

Pažnja: Konsultovati se sa pratećom dokumentacijom. Molimo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo.

Naziv/funkcije svakog dela




Ubacivanje baterije

- Palcem povucite poklopac odeljka za baterije.
- Ubacite ili zamjenite 2 baterije jačine „AAA“ shodno ispravnom električnom polaritetu.


Baterije zamjeniti kada se:
1. Ikonica baterija pali i gasi na ekranu.
2. Pritisne dugme funkcije, a na ekranu se ništa ne pojavljuje.

Oprez: Baterije mogu isciureti ili eksplodirati ukoliko se nepravilno koriste ili odlazu. Uklonite baterije ukoliko će se uređaj odlagati na duže vreme. Ne koristite različite tipove marki baterija istovremeno. Ne koristite istovremeno potpuno i delimično napunjene baterije.

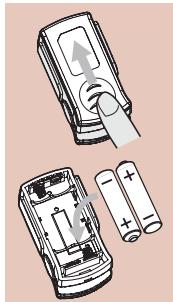

Postavljanje kratkog kabla

- Ubacite uski deo kabla kroz držać.
- Provucite drugi kraj kabla kroz omču na uskom kraju kabla.

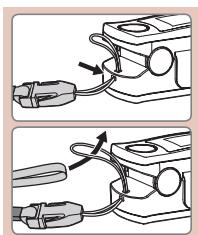

Upotreba

- Otvorite klips; pritisnite taster za uključivanje kao na slici 1.
- Povajljivo se informacije o verziji softvera; ubacite jedan prst u otvor za prst na pulsnom oksimetru tako da nokat gleda navije.

Napomena: Ako se prst ne ubaci, uređaj će se sam ugasiti nakon 8 sekundi.

- Indikator jačine pulsa pokazuje "—", i puljni oksimetar započinje merenje kao na slici 2.
- Napomena: Postaraće se da prst leži ravno. Nemojte tresti prst i držite telo stabilno tokom merenja kao na slici 3.
- Nakon nekoliko sekundi će se prikazati vaše vrednosti SpO₂ i pulsa, kao na slici 4.

- Napomena:
1. Ne uklanjajte prst dok se merenje ne završi.
2. Ako SpO₂ i puls ne mogu biti detektovani pojavljuje se "——" kao na slici 5.
3. Dok je jačina pulsa niska očitanje će blinkati.




Napomena:

- SpO₂ senzor i fotoelektrični prijemnik treba da budu namešteni u pravu arteriolu subjekta merenja i to između njih.
- Osigurajte da je optički put čist od ikakvih optičkih prepreka kao što je guminiran tkanina.
- Jako ambijentalno svetlo može uticati na rezultate merenja. To uključuje fluorescentne lampе, dualno rubinsko svetlo, infracrvene grejače, direktnu sunčevu svetlost i sl.
- Naporne aktivnosti subjekta merenja ili jako elektrohirurško mešanje takođe može uticati na tačnost.


Kodovi grešaka za Vašu referencu

POGREŠKA U RADU SENZORA:

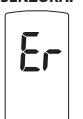

Senzor se ne može detektovati, vratite uređaj lokalnom distributeru ili servisnom centru.

POGREŠKA U MJERENJU:

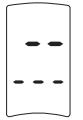

Signalni se ne mogu detektovati, isključite uređaj i izvršite ponovo merenje.

Napomene o merenju opreza

- Uredajem treba da rukuje samo obučeno osoblje.
- Uredaj nema zvučni signal i namenjen je samo trenutnom merenju, ne i medicinskim procenama rezultata.
- Ovaj uređaj je dizajniran da odredi procenat zasićenja arterijskog kiseonika u funkcionalnom hemoglobinu. Faktori koji mogu smanjiti performanse pulsnog oksimetrata ili uticati na preciznost merenja uključuju sledeće:
 - Ne postavljajte puljni oksimetar na istu ruku kao i manžetu aparata za pritisak, arterijski kateter ili infuziju (infuzio).
 - Jaka svetlost kao što je sunčevu ili direktno kućno svetlo.
 - Nestabilnost na mestu primene (npr. drhtanje)
 - Vлага na uređaju.
 - Neadekvatno upotrebljeni uređaj.
 - Prst je preveliki ili premali da bi stao u uređaju.
 - Loš kvalitet pulsa.
 - Venoze pulsacije.
 - Anemija ili nizak nivo koncentracije hemoglobina.
 - Cardiogreno ili druge intravaskularne boje.
 - Karboksihemoglobin.
 - Methemoglobin.
 - Disfunkcionalni hemoglobin.
 - Veštački nokti ili lak za nokte.
 - Prsti sa anatomskim promenama, edemi, ožiljci ili opekokine.
- Dugotrajno korišćenje ovog uređaja može izazvati bolove kod osoba sa poremećajem cirkulacije. Promenite položaj uređaja jednom svakih 4 sata kako bi koža pacijenta disala i kako biste redovno proveravali stanje pacijenta.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih ili eksplozivnih mešavina gasova.
- Ne koristite uređaj prilikom MRI ili CT skenera, ne koristiti na razdaljini bližoj od 30 cm (12 inča) od bilo kog deli [ME opreme ili ME sistemata], uključujući kablove određene od strane proizvođača.
- Uredaj možda neće raditi pri smanjenoj cirkulaciji. Zagrejte ili protrlijte prst ili promenite položaj uređaja.
- Uredaj je precizan tehnički instrument i njega mora popravljati kvalifikovani tehnički profesionalac. Popravke uređaja na terenu nisu moguće. Otvaranje kućišta može oštetići uređaj i učiniti garanciju nevažećom.
- Ne prekoracujte mogućnost opruge uređaja.
- Funkcionalni tester se ne može koristiti za procenu monitora pulsnog oksimetrata.
- Nemojte sami davati dijagnozu ili se sami lečiti na osnovu merenja bez konsultacije sa lekarom. Pogotovo nemojte kretati sa uzimanjem bilo kojih lekova ili menjanjem vrste i/ili doze postojeće terapije bez prethodne dozvole.

Čišćenje

- Očistite površinu uređaja pre upotrebe. Obrinite uređaj prvo medicinskim alkoholom (70% izopropil alkohol), ostavite da se osuši na vazduhu ili ga obrinite suvom tkaninom. Kada čistite uređaj vodom, temperatura vode treba da bude niža od 60°C.
- Koristite medicinski alkohol da dezinfikujete uređaj nakon upotrebe i sprečite unakrsnu infekciju za sledeći put.
- Najbolje okruženje za skladištenje je između -25°C i 70°C sobne temperature i ne više od 90% relativne vlažnosti.

Napomena:
1. Ne sterilisite, ne stavljajte u autoklav i ne potapajte uređaj u tečnost. Ne sipajte i ne prskajte tečnost na uređaj.
2. Ne koristite kaustične ili abrazivne agente za čišćenje i bilo kakva sredstva koji sadrže amonijumhlorid ili izopropil alkohol.

Održavanje

- Preporučuje se korisniku da uređaj na svaka 24 meseca vrati proizvođaču radi provere.
- Proveriti uređaj za mehaničke ili funkcionalne štete ili oštećenja.
 - Postarat se da svi korisnički dugmići i dodaci rade normalno.

Napomena: Proizvođač koristi simulator modela Index 2 kako bi proverio rad opreme pulsnog oksimetrata.